


Beach-Chair «Antirutschkissen» für die sichere und stabile Lagerung

Das **Antirutschkissen** wurde zusammen mit einem Spezialisten entwickelt und dient als optimale Ergänzung zur **Beach-Chair-Schiene**. In Kombination mit der BCS, verhindert es bei korrektem Lagern des Patienten in der Beach-Chair-Position, ein «Hinter- oder Rausrutschen» des Patienten aus der Kopfkalotte! Ebenso verhindert diese ein Rutschen des Patienten, welche in Rückenlage, in Anti-Trendelenburgposition gelagert wird, bei Operationen an der Karotis, Struma, Magenbypass, Lap, Adipositas-Chirurgie, HWS-Chirurgie mit ventralem Zugang, ORL (Septum) usw.



Die Kombination von Beach-Chair-Schiene und Antirutschkissen hat sich bewährt, um vor allem **kleinere Patienten** sicher zu lagern. Die Patienten werden mit dem Kissen ca. 7-15 cm höher und stabiler gelagert.

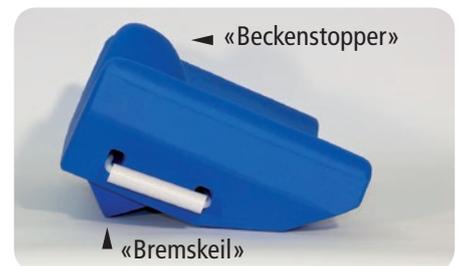


Das Kissen wird beim liegenden Patienten beckenah unter die Oberschenkel platziert. Der Patient wird aufgrund der speziellen Formgebung beim Aufrichten des Rückenteils in die Sitzposition auf das Kissen geschoben.


Die Oberschenkel sind in sitzender Position bis zur Mitte hin gestützt; die Knie und somit die Poplitea bleiben frei. Der visco-elastische Schaumstoff (Tempur) auf der Sitzfläche und die körpergerechte Sitzform verhindern Druckstellen am Gesäss (Dekubitus)

und passt sich so den Bewegungen des OP-Tisches an. Durch den «Beckenstopper» (oben am Kissen) und dem «Bremskeil» (unten am Kissen) wird ein Rutschen des Patienten verhindert.

Die nachfolgenden Bilder erläutern den Gebrauch die Positionierung und die Funktion des **Antirutschkissens**.

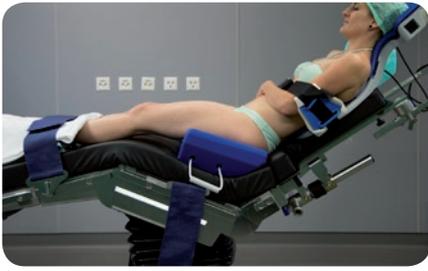

Tisch in leichter BC - Lage

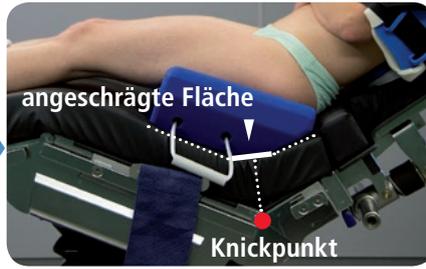

Die weisse Fläche muss über dem Knickpunkt zwischen Sitz und Rückenplatte liegen.



Tisch in flacher Position



Beim Aufrichten der Rückenplatte wird das Becken des Patienten auf das Kissen geschoben. Der Patient sitzt höher und stabiler.

Die seitlich angebrachten Griffe dienen dazu, den Patienten, wenn nötig an den Rand des OP-Tisches zu ziehen.



Die Rückenplatte muss nicht bis zum Maximum aufgesetzt werden, was bei kleinen, adipösen Patienten, beatmungstechnisch von Vorteil ist. Dadurch kann die Gefahr einer Beckenvenen-Trombose reduziert werden.



Der gleiche Vorgang erfolgt beim Zurückkippen des Rückenteils.


Für kleine Patienten



14 cm hoch

Model No. / Best. Nr. 420.2040

Für grosse Patienten

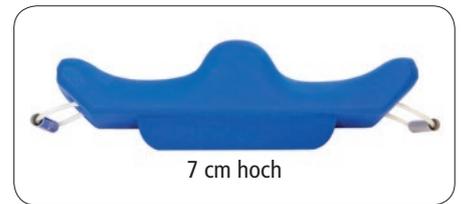

7 cm hoch

Model No. / Best. Nr. 420.2020

Die Vorteile der Verwendung des BC-Antirutschkissens sind folgende:

- Kleine Patienten gewinnen an Sitzhöhe
- Sie rutschen weniger aus der Kopfkalotte
- Das Becken rutscht nicht mehr fusswärts
- Die Kniekehlen werden druckentlastet

www.samarit.com

SAMARIT
improving patient care

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

