

# SAMARIT

safe patient moving & handling



## Sistemi di trasferimento SAMARIT "no lift"

Per uso  
intensivo!

# Rollbord™

HIGHTEC

### Per trasferire i pazienti in sicurezza

Requisito di legge in vigore in alcuni paesi (implicito in altri): le condizioni di lavoro dovrebbero essere le più confortevoli possibili. Gli operatori sanitari dovrebbero evitare di sollevare i pazienti quando li trasferiscono. I prodotti SAMARIT coadiuvano il trasferimento, senza rendere necessario il sollevamento. I prodotti sono progettati per agevolare il trasferimento senza grande sforzo, facilitando così il lavoro degli operatori e risparmiando loro traumi alla schiena.

**STANDARD**

*pieghevole*



\*SWL: 240 kg  
\*SWL: 529 lbs

Idonea per radiologia, sala operatoria, unità di terapia intensiva e tutti i reparti speciali.

**Dimensioni:** 178 x 50 cm 2.7 kg  
riducibile fino a 89 x 50 cm

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.0100**  
UDI/GTIN: 7640144460013

**UTI-BARIATRICA**

*non pieghevole*



\*SWL: 310 kg  
\*SWL: 684 lbs

Idonea per assistenza in unità di terapia intensiva, in stato sospeso e materassi antidecubito.

**Dimensioni:** 178 x 50 cm 3.8 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.0200**  
UDI/GTIN: 7640144460020

**MINI-GYN**

*non pieghevole*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Idonea per sale operatorie di urologia, ginecologia, stazioni post-coma e pronto soccorso.

**Dimensioni:** 91 x 50 cm 1.4 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.0300**  
UDI/GTIN: 7640144460037

\*SWL = Safe Weight Load

## 5 modelli differenti adatti ad ogni applicazione ospedaliera

- Prestazioni elevate
- Radiopaca
- Trattamento atossico e antibatterico
- Trasferimento del paziente in sicurezza
- Confortevole per il paziente
- Previene traumi della schiena degli operatori sanitari
- Anallergica (non contiene lattice)
- Facile da pulire e disinfettare
- Fodere monouso disponibili
- Tessuto di nylon antistrappo
- Ponte tra gli spazi vuoti fino a 20 cm
- Ultraleggero

**COVER DISPENSER**

*idonea per tutti i modelli Rollbord*



montaggio a parete

**Dimensioni:** 15 x 66 x 14 cm

**N. ordine 440.1088**  
UDI/GTIN: 7640144460495

## SURGIBOARD

*non pieghevole*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Idonea per sala operatoria, raggi X, reparti diversi.

**Dimensioni:** 120 x 40 cm 2.5 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

N. ordine 440.0400  
UDI/GTIN: 7640144460044

## MRI/CT

*pieghevole*

Opzione: borsa di protezione



\*SWL: 200 kg  
\*SWL: 440 lbs

Idonea per il trasferimento di pazienti feriti dalla/sulla barella.

**Dimensioni:** 178 x 40 cm 2.5 kg  
riducibile fino a 89 x 40 cm

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

N. ordine 440.0500  
UDI/GTIN: 7640144460051



## FODERA MONOUSO

*idonea per tutti i modelli Rollbord*



Protegge Rollbord da sangue e polvere.

**Dimensioni:**

200 cm, Ø 60 (50 pezzi)

135 cm, Ø 60 (74 pezzi)

200 cm N. ordine 440.1000  
UDI 7640144460471  
135 cm N. ordine 440.1400  
UDI 7640144460488

# I sistemi di trasferimento SAMARIT "no lift" facilitano il lavoro quotidiano con i pazienti

**SAMARIT garantisce comfort e sicurezza al paziente.**

Negli ospedali, dove può accadere che i pazienti debbano essere trasferiti più volte al giorno, **SAMARIT** semplifica l'attività dell'operatore ed è sinonimo di comfort per il paziente.

**Sistemi di trasferimento SAMARIT: un grande aiuto per gli operatori sanitari professionisti in tutto il mondo!**

Provando a immaginare il numero di trasferimenti effettuati ogni giorno negli ospedali e nelle comunità, si potrà apprezzare l'autentico valore dei sistemi **SAMARIT** originali. Di fatto oltre 150.000 sistemi di trasferimento **SAMARIT** sono attualmente utilizzati da professionisti dell'assistenza ospedaliera in tutto il mondo.

Tutti concordano sul fatto che il loro lavoro sia semplificato dai prodotti **SAMARIT**.

pesa solo 3 kg e può essere sistemato rapidamente e dovunque.



# Il sistema sicuro e affidabile per trasferire i pazienti

Rollbord™ **HIGHTEC**



*Mettere il paziente sul fianco, fare scivolare l'asse sotto il suo corpo e riportare il paziente nella posizione iniziale.*



*Spingere gentilmente il paziente agendo sulla spalla e del bacino senza forzare e trasferirlo.*



*Mettere il paziente sul fianco. Allontanare la rollboard iniziando dai piedi.*

**Materiale ecologico\*** Gli ausili per trasferimento SAMARIT sono realizzati con materiali ecologici. Possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e, in caso di incendio, non producono fumi tossici.

\* Tessuto liscio teflonizzato intorno ad un nucleo di schiuma di etilene, telo rivestito di poliestere, estremità di PE.

EU-SRN: CH-MF-000016280  
CHRN: CHRN-MF-20000184

[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

Richiedete anche gli opuscoli degli altri prodotti SAMARIT!

## Facile da pulire

Rollbord si pulisce perfettamente con *SamaClean Wipes* o qualsiasi disinfettante ospedaliero. Qualora si preveda la presenza di sporizia durante l'uso, si consiglia di utilizzare la fodera monouso Rollbord. Essa ricopre le estremità della Rollbord e consente di convogliare i residui senza toccarli all'interno della fodera, mantenendo pulita la superficie. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale (autorizzato).

## Standard della massima qualità

Gli ausili SAMARIT sono caratterizzati da:

- marchio CE
- brevetti della progettazione



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Rollbord H-Line



SAMARIT Transglide



Ausili per l'assistenza SAMARIT

Scaricate il materiale nella vostra lingua dal nostro sito web o richiedetelo al distributore locale.

**SAMARIT**  
safe patient moving & handling

SAMARIT MEDITALIA S.r.l.

Via A. Volta, 24

35050 SARMEOLA DI RUBANO (PD), Italia

Tel.: 049.8979968 Fax: 049.8986170

e-mail: [info@samarit.it](mailto:info@samarit.it)

