



**SAMARIT**  
improving patient care

## Sistemi di trasferimento SAMARIT "no lift"

Per uso  
intensivo!

**Rollbord**<sup>TM</sup>

**PROFESSIONAL**

### Per trasferire i pazienti in sicurezza

Requisito di legge in vigore in alcuni paesi (implicito in altri): le condizioni di lavoro dovrebbero essere le più confortevoli possibili. Gli operatori sanitari dovrebbero evitare di sollevare i pazienti quando li trasferiscono. I **prodotti SAMARIT** coadiuvano il trasferimento, senza rendere necessario il sollevamento. I prodotti sono progettati per agevolare il trasferimento senza grande sforzo, facilitando così il lavoro degli operatori e risparmiando loro traumi alla schiena.

## STANDARD

*pieghevole*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Idonea per radiologia, sala operatoria, unità di terapia intensiva e tutti i reparti speciali.

**Dimensioni:** 180 x 50 cm, 89 x 50 cm  
2.9 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.2100**  
UDI/GTIN: 7640144460143

## MRI

*pieghevole*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Idonea per sala operatoria, raggi X, reparti diversi.

**Dimensioni:** 180 x 42 cm, 90 x 42 cm  
2.3 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.2300**  
UDI/GTIN: 7640144460150

## AMBULANCE

*pieghevole*



\*SWL: 150 kg  
\*SWL: 331 lbs

Idonea per sale operatorie di urologia, ginecologia, stazioni post-coma e pronto soccorso.

**Dimensioni:** 165 x 42 cm, 82 x 42 cm  
1.9 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.2400**  
UDI/GTIN: 7640144460167

\*SWL = Safe Weight Limit

## 3 modelli differenti adatti ad ogni applicazione ospedaliera

- Prestazioni elevate
- Radiopaca
- Trattamento atossico e antibatterico
- Trasferimento del paziente in sicurezza
- Confortevole per il paziente
- Previene traumi della schiena degli operatori sanitari
- Anallergica (non contiene lattice)
- Facile da pulire e disinfettare
- Fodere monouso disponibili
- Tessuto di nylon antistrappo
- Ponte tra gli spazi vuoti fino a 20 cm
- Ultraleggero

## MINI

*non pieghevole*



\*SWL: 150 kg  
\*SWL: 331 lbs

Idonea per sale operatorie di urologia, ginecologia, stazioni post-coma e pronto soccorso.

**Dimensioni:** 80 x 50 cm 1.4 kg

Antibatterica, antifungina, ignifuga, estremità di sicurezza, rivestimento anallergico e facile da pulire.

**N. ordine 440.2200**  
UDI/GTIN: 7640144461201



**FODERA MONOUSO**  
idonea per tutti i modelli Rollbord



Protegge Rollbord da sangue e polvere.

**Dimensioni:**

200 cm, Ø 60 cm (50 pezzi)

135 cm, Ø 60 cm (74 pezzi)

200 cm **N. ordine 440.1000**

**UDI/GTIN: 7640144460471**

135 cm **N. ordine 440.1400**

**UDI/GTIN: 7640144460488**



## I sistemi di trasferimento SAMARIT "no lift" facilitano il lavoro quotidiano con i pazienti

**SAMARIT garantisce comfort e sicurezza al paziente.**

Negli ospedali, dove può accadere che i pazienti debbano essere trasferiti più volte al giorno, SAMARIT semplifica l'attività dell'operatore ed è sinonimo di comfort per il paziente.

**Sistemi di trasferimento SAMARIT: un grande aiuto per gli operatori sanitari professionisti in tutto il mondo!**

Provando a immaginare il numero di trasferimenti effettuati ogni giorno negli ospedali e nelle comunità, si potrà apprezzare l'autentico valore dei sistemi SAMARIT originali. Di fatto oltre 150.000 sistemi di trasferimento SAMARIT sono attualmente utilizzati da professionisti dell'assistenza ospedaliera in tutto il mondo.

Tutti concordano sul fatto che il loro lavoro sia semplificato dai prodotti SAMARIT.

pesa solo 3 kg e può essere sistemato rapidamente e dovunque.



# Il sistema sicuro e affidabile per trasferire i pazienti

Rollbord™ **PROFESSIONAL**



*Mettere il paziente sul fianco, fare scivolare l'asse sotto il suo corpo e riportare il paziente nella posizione iniziale.*



*Spingere gentilmente il paziente agendo sulla spalla e del bacino senza forzare e trasferirlo.*



*Mettere il paziente sul fianco. Allontanare la rollboard iniziando dai piedi.*

**Materiale ecologico\*** Gli ausili per trasferimento **SAMARIT** sono realizzati con materiali ecologici. Possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e, in caso di incendio, non producono fumi tossici.

\* Tessuto liscio teflonizzato intorno ad un nucleo di schiuma di etilene, telo rivestito di poliestere, estremità di PE.

## Facile da pulire

Rollbord si pulisce perfettamente con *Clean Wipes* o qualsiasi disinfettante ospedaliero. Qualora si preveda la presenza di sporcizia durante l'uso, si consiglia di utilizzare la fodera monouso Rollbord. Essa ricopre le estremità della Rollbord e consente di convogliare i residui senza toccarli all'interno della fodera, mantenendo pulita la superficie. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale (autorizzato).

## Standard della massima qualità

Gli ausili SAMARIT sono caratterizzati da:

- marchio CE
- brevetti della progettazione

EU-SRN: CH-MF-000016280  
CHRN: CHRN-MF-20000184

[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

Richiedete anche gli opuscoli degli altri prodotti SAMARIT!



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Transglide



Ausili per l'assistenza SAMARIT

Scaricate il materiale nella vostra lingua dal nostro sito web o richiedetelo al distributore locale.

**SAMARIT**  
improving patient care

SAMARIT MEDITALIA S.r.l.

Via A. Volta, 24

35050 SARMEOLA DI RUBANO (PD), Italia

Tel.: 049.8979968 Fax: 049.8986170

e-mail: [info@samarit.it](mailto:info@samarit.it)

