

SAMARIT

safe patient moving & handling



For
HEAVY
use!

Le système de transfert pratique et avantageux pour les personnes qui ont besoin de soins.

SAMARIT Transglide complète de façon idéale notre gamme avec les produits "Rollbord" et "Rollbody". Des accessoires qui apportent une aide considérable dans les maisons de soins, dans les cliniques et pour les soins à domicile.

SAMARIT **TRANSGLIDE** LATERAL TRANSFER

LARGE
PATGLIDE
SMALL
ACCIDENT & EMERGENCY*

Les principaux avantages:

- Maniement pratique par un(e) ou deux préposé(e)s aux soins
- Léger, il ne pèse que 3,5 kg
- Matériau solide, incassable (polyéthylène haute densité)
- Surface présentant d'excellentes propriétés de glissement
- D'un entretien facile, résistant aux acides
- Perméable aux rayons X
- Permet de surmonter des différences de niveau qui peuvent atteindre 15 cm
- Pourvu de bandes de sécurité (3M) à la face postérieure
- Rapport qualité / prix intéressant

Il est également utilisable pour la réanimation cardiaque sur le lit.

*Sur commande seulement

SAMARIT


Samarit transfer systems

Une aide au transfert de très haute qualité dont la surface présente d'excellentes propriétés de glissement.



LARGE

Dimensions: 170 x 65 cm
Référence article: 471.1170

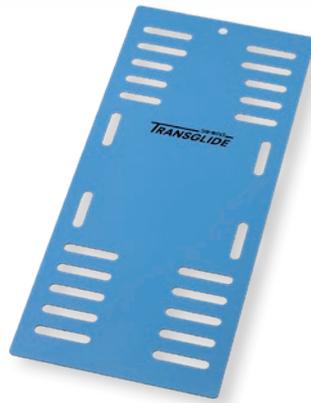

PATGLIDE

Dimensions: 152 x 63 cm
Référence article: 471.5263



SMALL

Dimensions: 140 x 48 cm
Référence article: 471.1140



ACCIDENT & EMERGENCY

Dimensions: 140 x 48 cm
Référence article: 471.1180
Sur commande seulement

MODE D'EMPLOI



Tournez le patient à l'aide du "linge de traction" soigneusement en position latérale, poussez la plaque Transglide sous le linge et reposez celui-ci sur la plaque. Empoignez le "linge de traction" avec les deux mains, sans vous pencher et en gardant le dos bien droit.

SAMARIT apporte également aux patients confort et sécurité. Toutes, elles apprécient les avantages que leur offrent nos produits à l'usage en facilitant leur travail et en ménageant leur dos.


Transglide se distingue par sa simplicité, son endurance et son prix intéressant.



Tirez le patient régulièrement avec le linge sur le Transglide en gardant le dos bien droit. La deuxième personne apporte son soutien à l'opération en poussant légèrement.

Nettoyage
Il s'effectue par friction à l'aide des lingettes (Ecolab: Sani-Cloth Active).

Matériau écophile
Le polyéthylène haute densité est recyclable sans problème. En cas d'incendie, pas de dégagement de vapeurs toxiques.

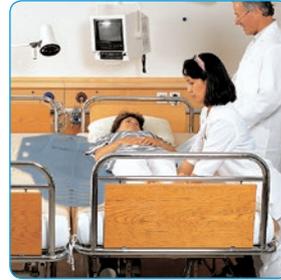

Lorsque le patient est parvenue dans la position souhaitée sur le lit / le brancard / la table de radiographie etc., tournez le patient légèrement sur le côté et la deuxième personne tire le Transglide au pied du lit (ou du brancard) avec un léger mouvement de rotation sous le patient pour le retirer.

Un stockage qui demande peu de place
Transglide présente l'avantage de pouvoir être suspendu à un crochet au mur grâce à l'encoche prévue à cet effet.



LINGE DE TRACTION

en nylon résistant

Dimension: 150 x 150 cm
Réf. article: 471.1200

PS: En enlevant les bandes anti-dérapantes, vous pourrez également transférer le patient en position couchée sur le Transglide et il pourra rester couché sur le Transglide pendant le traitement (par exemple pour la radiographie).

Des normes de haute qualité

Les équipements de transfert SAMARIT bénéficient du :

- marquage CE
- Brevets d'invention
- 2 ans de garantie



www.samarit.com

Demandez aussi les brochures des autres produits SAMARIT !

SAMARIT
safe patient moving & handling

SAMARIT Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

SAMARIT
TRANSGLIDE
LATERAL TRANSFER