

# SAMARIT

safe patient moving & handling



For  
**HEAVY**  
use!

Il sistema di trasferimento maneggevole ed economico per chi ha bisogno di assistenza.

Insieme al "Rollbord" ed al "Rollbody" il SAMARIT Transglide rappresenta il completamento ideale del nostro programma. Un grande aiuto per ospedali, case di cura e case di riposo.

## **SAMARIT** **TRANSGLIDE** LATERAL TRANSFER

**LARGE**  
**PATGLIDE**  
**SMALL**  
**ACCIDENT & EMERGENCY\***

Caratteristiche:

- Utilizzo manuale da parte di una o due addetti all'assistenza
- Leggero, pesa soltanto 3,5 kg
- In materiale solido e resistente alla rottura (HDPE)
- Superficie a scivolamento facilitato
- Di facile manutenzione, resistente agli acidi
- Compatibile con gli esami radiologici
- In grado di superare dislivelli
- Provvisto di bande di sicurezza sulla parte posteriore (3M)
- Rapporto favorevole prezzo/prestazioni

Utilizzabile anche a letto per la stimolazione cardiaca

\*Solamente disponibile su richiesta

**SAMARIT**


Samarit transfer systems

Un aiuto nel trasferimento dei pazienti di alta qualità con superficie a scivolamento facilitato.



### LARGE

Dimensioni: 170 x 65 cm  
N. articolo: 471.1170

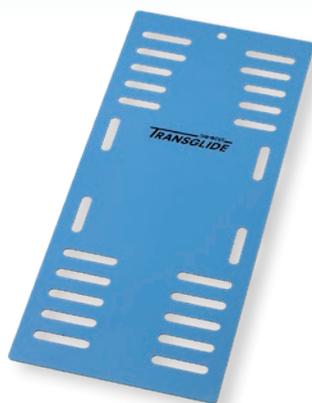

### PATGLIDE

Dimensioni: 152 x 63 cm  
N. articolo: 471.5263



### SMALL

Dimensioni: 140 x 48 cm  
N. articolo: 471.1140



### ACCIDENT & EMERGENCY

Dimensioni: 140 x 48 cm  
N. articolo: 471.1180  
Solamente disponibile su richiesta

## ISTRUZIONI PER L'USO



Ruotate con cura il paziente lateralmente mediante il "panno di trazione", portate la piastra del Transglide sotto il panno e riportate il paziente nella posizione originaria sopra la piastra. Afferrate il "panno di trazione" con le due mani e trattenete la schiena in posizione diritta.

SAMARIT significa comfort e sicurezza anche per il paziente. E tutti loro stimano l'utilità dei nostri prodotti; il lavoro diventa più semplice, la schiena alleggerita.

Transglide si caratterizza per la sua semplicità di realizzazione, le doti di durata ed un prezzo vantaggioso.



Portate il paziente sulla piastra mediante il panno esercitando la trazione in modo uniforme e mantenendo la schiena in posizione diritta. La seconda persona coadiuva l'operazione mediante leggere spinte.

**Pulizia**  
La pulizia avviene con gli speciali panni (Ecolab: Sani-Cloth Active) o mediante spazzola.

**Materiali rispettosi dell'ambiente**  
Il HDPE è facilmente smaltibile e riutilizzabile. In caso di incendio non vengono emessi vapori tossici.



Quando il paziente ha raggiunto la posizione corretta sul letto / sul divano / sul tavolo radiologico, etc. spostate il paziente leggermente a lato mentre la seconda persona rimuove il Transglide all'estremità dei piedi da sotto il paziente mediante leggera rotazione.

**Formula salvaspazio**  
Il Transglide può essere appeso ad un gancio della parete utilizzando le apposite tacche di fissaggio.



### LINGE DE TRACTION

in nylon resistente

Dimensioni: 150 x 150 cm  
N. articolo: 471.1200

P.S. Rimuovendo le bande antidrucciolo il paziente può essere trasferito sul Transglide anche in posizione coricata a rimanere su di esso durante il trattamento (ad es. durante le analisi radiologiche).

### Standard della massima qualità

Gli ausili SAMARIT sono caratterizzati da:

- marchio CE
- brevetti della progettazione
- 2 anni di garanzia



[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

Richiedete anche gli opuscoli degli altri prodotti SAMARIT!

**SAMARIT**  
safe patient moving & handling

SAMARIT Medical AG  
Gewerbstrasse 12  
CH-8132 Egg, Schweiz  
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39  
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

**SAMARIT**  
**TRANSGLIDE**  
LATERAL TRANSFER